

# NÁVOD K POUŽITÍ

POJÍZDNÉ KLOZETOVÉ KŘESLO

# 512 N WHD



## **POUŽITÍ**

Klozetové křeslo je součástí řady kompenzačních pomůcek pro osoby se sníženou schopností mobility a tělesně postižené. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům toaletu a osobní hygienu, eliminují riziko pádu a zvyšují jeho soběstačnost. Využití nachází především tam, kde není možné, vzhledem k pacientově zdravotnímu stavu, použít standardně vybavené WC.

## **POPIS**

Ocelový rám křesla je doplněn omyvatelnou polstrovanou toaletní deskou s výřezem, opěrkou zad a plastovou toaletní nádobou (ACC/5A). Boční sklopná madla mají pohodlné polstrované područky. Křeslo je dále vybaveno odklopnými a odnímatelnými podnožkami a čtyřmi otočnými kolečky, z nichž zadní dvě jsou opatřena nášlapnou brzdou.

## **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Před používáním křesla konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Před používáním křesla si přečtěte návod a v případě nejasností kontaktujte dodavatele.

Při montáži křesla postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Vždy kontrolujte, zda je křeslo suché a jsou-li odstraněny zbytky mycích prostředků.

Křeslo nepřetěžujte a nepřekračujte maximální statickou nosnost 160 kg (viz štítek).

Dodržujte doporučené maximální dynamické zatížení pomůcky 140 kg.

Je-li křeslo v klidu, vždy zaaretujte brzdy.

Při užívání křesla musí být všechny nohy v kontaktu s protiskluzovým podkladem.

Pro zachování maximální bezpečnosti pravidelně kontrolujte stav všech jistících prvků.

Při transportu (automobilem, autobusem, vlakem apod.) nepoužívejte křeslo k sezení.

Křeslo není určeno pro transport osob jako náhrada transportního vozíku.

## **ÚDRŽBA**

Křeslo lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a bezpečnost doporučujeme pravidelně kontrolovat stav všech jistících prvků, koleček i brzd a odstraňovat mechanické nečistoty všech částí. Občasné lehké promazání (sprej WD-40) pohyblivých částí zaručí bezchybný a bezhlučný provoz. Po očištění křesla ho vždy řádně osušte.

## **SERVIS A OPRAVY**

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

**SLOŽENÍ KŘESLA**

Vyjměte z krabice rám křesla s kolečky a područky zacvakněte pojistkou (1) do úchytů na přední části křesla (A) (madla sklopíte uvolněním této pojistky). Nasadte podnožky na úchyty umístěné na bocích křesla (B) a otočte směrem dovnitř, až zapadne bezpečnostní pojistka (2). Podnožky odklopite uvolněním této pojistky. Pro nastavení výšky stupačky zmáčkněte „V“ pojistku (3), nastavte požadovanou výšku a zkontrolujte opětovné zaklapnutí pojistky. Zezadu vložte do držáků plastovou toaletní nádobu. Nyní je křeslo připraveno k použití.



Nasazení a odklopení madel



Nasazení a nastavení podnožek