

NÁVOD K POUŽITÍ

KLOZETOVÉ KŘESLO

516



CE

POUŽITÍ

Klozetové křeslo je součástí řady kompenzačních pomůcek pro osoby se sníženou schopností mobility a tělesně postižené. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům toaletu a osobní hygienu, eliminují riziko pádu a zvyšují jeho soběstačnost. Využití nachází především tam, kde není možné, vzhledem k pacientově zdravotnímu stavu, použít standardně vybavené WC.

POPIS

Rám křesla s bočními pevnými madly je doplněn omyvatelným plastovým toaletním sedátkem s víkem a plastovou toaletní nádobou. Výškově nastavitelné opěrné nohy jsou opatřeny protiskluzovými pryžovými nástavci.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním křesla konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Před používáním křesla si přečtěte návod a v případě nejasností kontaktujte dodavatele.

Při montáži křesla postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Vždy kontrolujte, zda je křeslo suché a jsou-li odstraněny zbytky mycích prostředků.

Křeslo nepřetěžujte a nepřekračujte maximální statickou nosnost 130 kg (viz štítek).

Dodržujte doporučené maximální dynamické zatížení pomůcky 120 kg.

Při užívání křesla musí být všechny nohy v kontaktu s protiskluzovým podkladem.

Pro zachování maximální bezpečnosti pravidelně kontrolujte stav všech jisticích prvků.

Při transportu (automobilem, autobusem, vlakem apod.) nepoužívejte křeslo k sezení.


Křeslo není určeno pro používání ve vlhkém prostředí (sprcha apod.).

NASTAVENÍ VÝŠKY SEDU

Pro nastavení výšky sedu zamáčkněte pojistku (A) a tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy a tím i výšku sedu. Pojistku pak nechte samovolně zapadnout do zvoleného otvoru. Postup opakujte u všech čtyř nohou.

MANIPULACE S HYGIENICKOU NÁDOBOU

Odklopte plastové hygienické prkénko (B) směrem nahoru a nádobu (C) vyjměte z držáků pod prkénkem.

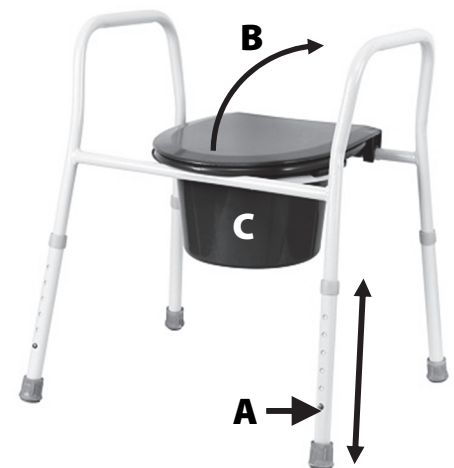

ÚDRŽBA

Křeslo lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.