

NÁVOD K POUŽITÍ

NÁJEZDOVÁ RAMPA

2521, 3838, 5041




POUŽITÍ

Nájezdové rampy tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Ulehčují překonání menší nerovnostní bariéry, jakou je např. práh, menší schod nebo obrubník apod.

POPIS

Gumový klín je vybaven protiskluzovým povrchem a umožňuje snadnou a pohodlnou manipulaci. Rampy se nabízejí ve 3 velikostech:

2521 (110×21×2,5 cm), 3838 (110×32×3,8 cm) a 5041 (110×41×5 cm).

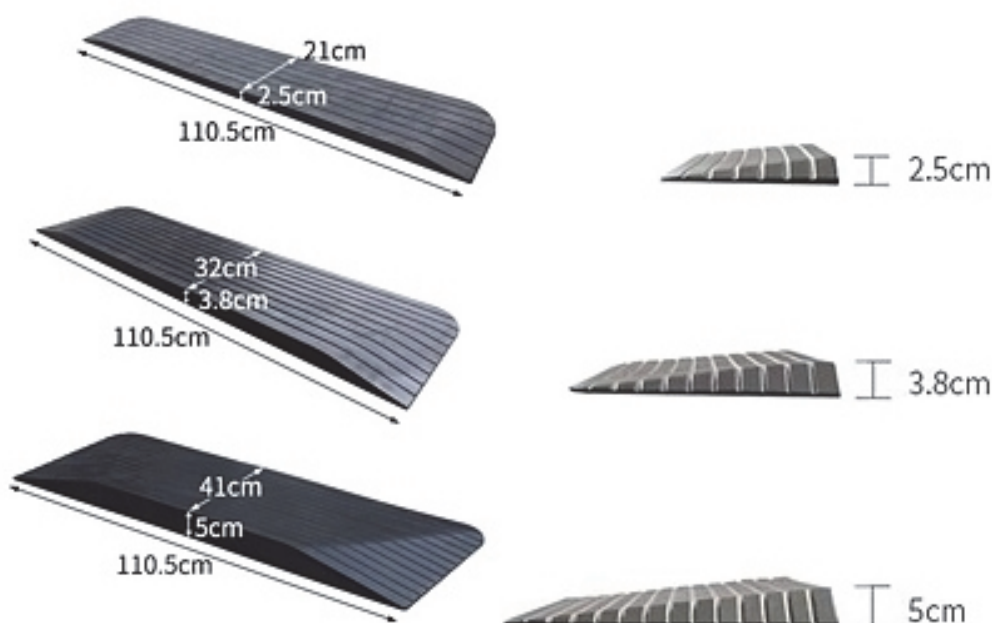

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním klínu si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Při manipulaci s klínem postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Nepřekračujte maximální nosnost rampy 400 kg.

INSTALACE RAMPY:

Položte rampu těsně k překážce z jedné nebo obou stran a ujistěte se, zda je dostatečně stabilní.

ÚDRŽBA

Klíny lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti doporučujeme pravidelně kontrolovat a odstranit mechanické nečistoty.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.