

ORTOSERVIS

Ronkova 13/353, 180 00 Praha 8 ☎ 266313652,
ortoservis@ortoservis.cz, www.ortoservis.cz



Návod k použití
toaletního a sprchovacího
vozíku **GENF**

Popis vozíku

Toaletní a sprchovací vozík Genf je určen pro usnadnění hygienických potřeb uživatele. Vozík je vybaven dvěma malými otočnými kolečky a dále párem velkých kol s poháněcími obručkami pro samostatný pohyb uživatele. Toaletní vozík je vybaven plastovou nádobou, přičemž dvoudílný sedák umožňuje vyjmutí nádoby jak zezadu, tak shora. Konstrukce vozíku a použité materiály dále umožňují jeho využití v mokřém prostředí. Po odejmutí ozdobného krytu sedačky a vyjmutí toaletní nádoby lze velmi snadno provést všechny základní hygienické úkony včetně sprchování. Vozík je určen pro pohyb v interiéru. Není vhodný pro dlouhodobé sezení.

Rozměry vozíku jsou následující:

Šířka sedačky	46 cm
Výška sedačky od země	55 cm
Hloubka sedačky	45 cm
Průměr předních koleček	12,5 cm
Celková šířka	71 cm
Celková délka	97 cm
Hmotnost	24 kg
Nosnost: max.	130 kg

Komponenty

PODRUČKY

Područky vozíku jsou odklopitelné směrem dozadu. Vytažením aretačního kolíku ve spodní části loketní opěrky lze celou postranicí sklopit směrem dozadu. Toto odklopení usnadňuje přisedání na vozík z postele či židle. Po zpětném přiklopení postranice vždy zkontrolujte, zda je řádně zaaretována.

ZÁDOVÁ OPĚRKA

Zádová opěrka je celoplastová, je opatřena tlačným madlem v horní části a otvory, které umožňují protékání vody ale i prodyšnost. Zádovou opěrku lze opatřit (s doplatkem) přídatným polstrováním, které se připevňuje do otvorů. Zádovou opěrku lze odejmout po odklopení područek vytažením směrem nahoru.

SEDÁK A NÁDOBA

Sedačka je tvořena dvěma díly. Spodním dílem a vrchní tvarovanou deskou s otvorem. Tento otvor je dále překryt ozdobným, vyměkčeným krytem. Nádoba je zavěšena ve spodní části sedačky a je možno ji vyjmout zezadu. Po zvednutí horního dílu sedačky je možno nádobu vyjmout i směrem nahoru. Nádoba je opatřena víkem a uchem. Před použitím je nutno odstranit víko a ozdobný kryt sedáku.

STUPAČKY

Vozík je vybaven dvěma plastovými stupačkami. Obě stupačky jsou samostatně odklopitelné do strany a jejich nášlapné plochy jsou sklopitelné vzhůru. Chcete-li stupačku odklopit, nejprve sklopte nášlapnou plochu vzhůru, poté mírně zvedněte celou stupačku a otočte ji směrem ven z vozíku až do polohy rovnoběžné s bočnicí.

POZOR: při nasedání na vozík, či vstávání z něj mějte vždy nášlapné plochy ve svislé poloze, či stupačky plně odklopené! Nikdy se nestavějte na stupačky, mohlo by dojít k jejich zlomení!

KOLEČKA A KOLA

Vozík je vybaven dvěma malými plnými otočnými kolečky o velikosti 5“. Zadní kola tvoří pár plných velkých kol o rozměru 24x1 s poháněcími obručemi. Nasedáte-li na vozík, mějte jej vždy zabrzděný. Vozík zabrzdíte tak, že páky brzd odtlačíte směrem od kola až do zacvaknutí, odbrzdíte jej pak přitažením páky brzdy k sobě. Pro bezpečné zabrzdění vozíku na místě je nutné, aby páčky obou brzd byly odtlačeny směrem od uživatele až po jejich zacvaknutí

Údržba vozíku

Vozík je vyroben z kvalitní umělé hmoty. Plastové povrchy odpuzují nečistoty, jsou odolné vůči oděru a jsou příjemné ve styku s pokožkou. Při čištění používejte obvyklé čisticí prostředky (saponáty) v návodem stanovené koncentraci. Na vozík lze použít i běžné dezinfekční prostředky. Příležitostné naolejování pohyblivých částí vozíku přispěje k bezporuchovému provozu a prodlouží jeho životnost.

Záruka a opravy

Na vozík je poskytována záruka 2 roky na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a vady vzniklé nesprávným používáním. Se záručními a ale i s pozáručními opravami se vždy obraťte z důvodu zachování záruky pouze na naše odborná pracoviště na níže uvedených adresách. Věříme, že Vám vozík ulehčí Vaši situaci a že s ním budete spokojeni.

Váš

ORTOSERVIS

ORTOSERVIS
Ronkova 13/353
180 00 Praha 8
tel: 266 313 652
fax: 266 313 652-11

ORTOSERVIS
Pivovarská 7/71
746 01 Opava
tel/fax: 553 775 226

ORTOSERVIS
Staroměstská 2608
370 04 České Budějovice
tel/fax: 387 432 502

ORTOSERVIS
Minská 100
616 00 Brno
tel: 541 240 393

- ① Dodavatel ujistí uje spotřebitele, že na tento výrobek bylo vystaveno prohlášení o shodě.