

NÁVOD K POUŽITÍ



INFUZNÍ STOJAN POJÍZDNÝ TGR-R SK-4H



NÁVOD K POUŽITÍ



INFUZNÍ STOJAN POJÍZDNÝ TGR-R SK-4H



5

902983

720522

POUŽITÍ

Infuzní stojan usnadňuje podávání infuzních tekutin. Je určen pro použití v domácích a nemocničních zařízeních.

POPIS

Infuzní stojan je vyroben z duralu, má čtyři háky a plastovou základnu s pěti koly a brzdami. Díky jednoduchému nastavení výšky má možnost individuálního přizpůsobení potřebám uživatele.

Celková výška: 104 -211 cm

Průměr základny: 56 cm

Výška základny: 13 cm

Průměr koleček: 5 cm (2")

Nosnost jednoho háku: 2,5 kg,

Hmotnost: 2,56 kg

MONTÁŽ

Krok 1. Vložte plastový konektor (3) do otvoru ve středu základny (4).
(Pokud již není vložen z výroby).

Krok 2. Umístěte stojan (2) do plastového konektoru (3).

Krok 3. Ze spodní části základny (4) vložte podložky (5,6) a zašroubujte šroub (7).

Krok 4. Vrchní část s háky (1) našroubujte na horní část stojanu (2).

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepřekračujte maximální zatížení háků.
- Neopírejte se o stojan.
- Neprovádějte žádné opravy nebo úpravy konstrukce.
- Před použitím se ujistěte, že výrobek nevykazuje žádné vady či poškození. Poškozený výrobek nepoužívejte, může dojít k úrazu!
- Neskladujte při minusových teplotách a velmi vysoké vlhkosti.



ÚDRŽBA

Stojan lze čistit a udržovat běžnými šetrnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky (např. mýdlo), které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu (benzín, bělicí prostředky apod.). Pro zachování maximální bezpečnosti doporučujeme pravidelně kontrolovat stav všech jisticích prvků.

Jednou za 3 měsíce:

- Dotáhněte šrouby
- Zkontrolujete stav jisticího prvku pro nastavení výšky
- Zkontrolujte stav trubek, jestli se nevyskytují praskliny
- Zkontrolujte stav koleček

ZÁRUKA

Poskytnutá záruka se vztahuje na výrobní vady a nevztahuje se na poškození vlivem opotřebení, způsobeného obvyklým užíváním. Záruka zaniká při jakémkoliv úpravě, opravě, nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než odborným servisem, anebo s jeho souhlasem. Záruka se nevztahuje také na vady a poškození vzniklé v důsledku nedodržení pokynů k údržbě a při nesprávném používání výrobku v rozporu s touto instrukcí.

Datum poslední revize návodu: 29.9.2021



Výrobce: Timago International Group Sp z.o.o., Polsko

Výhradní distributor pro ČR: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711 827,

info@distrimed.cz, www.distrimed.cz



POUŽITÍ

Infuzní stojan usnadňuje podávání infuzních tekutin. Je určen pro použití v domácích a nemocničních zařízeních.

POPIS

Infuzní stojan je vyroben z duralu, má čtyři háky a plastovou základnu s pěti koly a brzdami. Díky jednoduchému nastavení výšky má možnost individuálního přizpůsobení potřebám uživatele.

Celková výška: 104 -211 cm

Průměr základny: 56 cm

Výška základny: 13 cm

Průměr koleček: 5 cm (2")

Nosnost jednoho háku: 2,5 kg,

Hmotnost: 2,56 kg

MONTÁŽ

Krok 1. Vložte plastový konektor (3) do otvoru ve středu základny (4).
(Pokud již není vložen z výroby).

Krok 2. Umístěte stojan (2) do plastového konektoru (3).

Krok 3. Ze spodní části základny (4) vložte podložky (5,6) a zašroubujte šroub (7).

Krok 4. Vrchní část s háky (1) našroubujte na horní část stojanu (2).

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepřekračujte maximální zatížení háků.
- Neopírejte se o stojan.
- Neprovádějte žádné opravy nebo úpravy konstrukce.
- Před použitím se ujistěte, že výrobek nevykazuje žádné vady či poškození.
Poškozený výrobek nepoužívejte, může dojít k úrazu!
- Neskladujte při minusových teplotách a velmi vysoké vlhkosti.

ÚDRŽBA

Stojan lze čistit a udržovat běžnými šetrnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky (např. mýdlo), které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu (benzín, bělicí prostředky apod.). Pro zachování maximální bezpečnosti doporučujeme pravidelně kontrolovat stav všech jisticích prvků.

Jednou za 3 měsíce:

- Dotáhněte šrouby
- Zkontrolujte stav jisticího prvku pro nastavení výšky
- Zkontrolujte stav trubek, jestli se nevyskytují praskliny
- Zkontrolujte stav koleček

ZÁRUKA

Poskytnutá záruka se vztahuje na výrobní vady a nevztahuje se na poškození vlivem opotřebení, způsobeného obvyklým užíváním. Záruka zaniká při jakékoliv úpravě, opravě, nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než odborným servisem, anebo s jeho souhlasem. Záruka se nevztahuje také na vady a poškození vzniklé v důsledku nedodržení pokynů k údržbě a při nesprávném používání výrobku v rozporu s touto instrukcí.



Výrobce: Timago International Group Sp z.o.o., Polsko



Výhradní distributor pro ČR: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711 827,
info@distrimed.cz, www.distrimed.cz

Datum poslední revize návodu: 29.9.2021

