

Návod k použití: Navlékač ponožek

Přečtěte si a uchovejte tento návod, poskytuje základní informace pro správné a bezpečné použití.

Navlékač ponožek pomáhá kompenzovat zdravotní postižení tím, že umožňuje člověku oblékat ponožky nebo podkolenky bez nutnosti ohýbat se v pase nebo v bocích. Určeno pro osoby s omezenou funkcí rukou, problémy se zády, vozíčkáře nebo osoby po operaci kyčelního či kolenního kloubu. Navlékač pomáhá snižovat ohýbání v pase při oblékání ponožek. Výhodou je snadné používání.

Vnější froté povrch drží ponožky nebo podkolenky bezpečně na místě. Navlékač lze přizpůsobit, aby vyhovoval jakékoliv velikosti ponožek nebo podkolenek.

Postup navlékání:

1. Sevěte oba boční okraje navlékače ponožek a navlékněte ponožku na něj.
2. Držte popruhy a položte navlékač ponožek na podlahu před nohu.
3. Vsuňte nohu do otvoru ponožky a táhněte popruh nahoru, dokud ponožka pohodlně nesedne na nohu.
4. Dalším tahem za popruhy uvolněte navlékač z ponožky.

Údržba:

Navlékač ponožek neperte v pračce, lze čistit pouze ručním praním ve vlažné vodě, nesušte v sušičce. Pravidelně kontrolujte opotřebení a poškození.



Technické parametry:

Délka navlékače: 22 cm

Délka popruhu: 70 cm

Hmotnost: 70 g

Materiál: PP, nylonová tkanina, froté tkanina, bavlna

Údržba: navlékač ponožek neperte v pračce, lze čistit pouze ručním praním ve vlažné vodě, nesušte v sušičce. Pravidelně kontrolujte opotřebení a poškození.