

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Toaletní křeslo 04-7400

Před použitím zařízení si důkladně přečtěte návod k použití. Najdete v něm užitečné informace a pravidla týkající se bezpečnosti a efektivního používání zařízení.

Máte-li dotazy nebo připomínky, kontaktujte svého prodejce.

Děkujeme za zakoupení zařízení.

Před použitím je uživatel povinen se seznámit s návodem k použití. Dodržování zmíněných pravidel je velice důležité a zaručuje bezpečnost a dlouhou životnost zařízení.

Zařízení má certifikaci CE.




### Úvod

Toaletní křeslo pevné je vhodné pro uživatele, kteří mají pohybové omezení a mají problém s hygienou na toaletě. Toaletní křeslo je nepojízdné, má nastavitelné nohy, polstrovaný sed s dírou a polstrovaný sedák na kryt sedu.

### Popis produktu

Standardní vybavení

1. Zádová opěrka
2. Loketní opěrky
3. Kryt sedu
4. Polstrovaný sed s dírou
5. Nastavitelné nohy
6. Kbelík

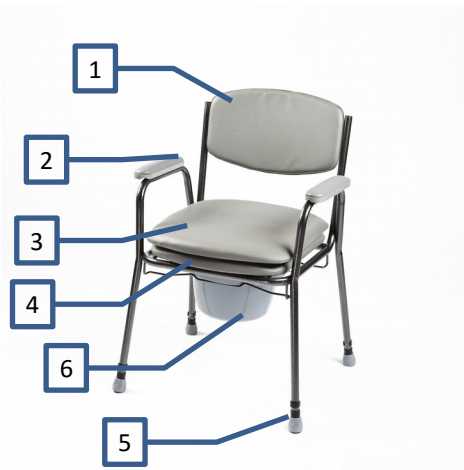

### Technické parametry

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Celková šíře [cm]  | 58    |
| Celková výška [cm] | 82-98 |
| Šíře sedu [cm]     | 43    |
| Hloubka sedu [cm]  | 45    |
| Výška zad [cm]     | 35    |
| Výška sedu [cm]    | 44-60 |
| Hmotnost [kg]      | 8,6   |
| Nosnost [kg]       | 130   |

### Obsluha

Pro nastavení výšky sedu sejměte pojistku na noze, posuňte nohu, jak potřebujete, ale tak aby jste skrze otvor viděli otvor na vnitřní trubce a poté pojistku zasuňte do otvoru. Toto opakujte u všech nohou. Pozor všechny nohy je třeba nastavit na stejnou délku.

Před použitím sejměte kryt sedu a odklopte polstrovaný sedák s dírou. Přesvědčte se, že pod sedákem je kbelík bez víka případně víko sejměte a sedák s dírou zase přiklopte. Poté je možné toaletní křeslo použít.

Vyjmutí kbelíku z křesla provedete odklopením sedu s dírou a vyjměte kbelík.

## Bezpečnostní pravidla

Před použitím tohoto zařízení je nutné se seznámit s pravidly uvedenými v tomto návodu k použití.

Před použitím je nutné:

- Ujistit se, že na zařízení nejsou žádná poškození, která by mohla ohrozit pacientův život.
- Nastavit výšku sedu dle potřeb pacienta.
- Ujistit se, že pojistky na nohách jsou správně zastrčené.

Je zakázáno používat toto zařízení pro jiné účely, než pro které je určeno.

Pacient nesmí používat zařízení při jízdě autem, vlakem apod.

Zajistěte zařízení během přepravy, aby nedošlo k jeho poškození. Výrobce nenes odpovědnost za škody vzniklé nesprávnou manipulací se zařízením během přepravy.

Nesprávné nastavení zařízení může vést k nestabilitě.

Je zakázáno provádět jakékoli změny na zařízení, neboť by mohly vést k ohrožení života a ztrátě záruky.

Dodržujte bezpečnostní pravidla a doporučení popsána v tomto návodu k použití.

Výrobce vyrábí zařízení bez výrobních vad. Odpovědnost za vady je 24 měsíců. Je-li nutné vyměnit části zařízení, kontaktujte svého prodejce.

## Údržba a čištění

Zařízení by mělo být udržováno čisté a v souladu s doporučeními výrobce. Zařízení musí být udržováno v čisté, suché a dobře větrané místnosti. Údržba a čištění se musí provádět po každém použití minimálně jednou denně.

Pravidelné čištění a údržba zařízení jsou nezbytné pro zajištění správné funkce a bezpečnosti. Doporučuje se dbát na správnou údržbu, aby zařízení působilo esteticky. Je nutné se řídit následujícími pravidly:

1. Je nutné čistit čalouněné části pomocí vhodného čistícího přípravku a teplé vody.
2. Případné skvrny na čalounění očistíte houbičkou nebo měkkým kartáčem. Nedoporučuje se čištění tvrdým kartáčem.
3. Je zakázáno čistit čalounění silnými chemickými prostředky, jako jsou rozpouštědla nebo žíraviny.
4. Zařízení nesmí být mácháno ve vodě.
5. Je zakázáno provádět čištění, výměnu nebo údržbu částí zařízení, pokud je v něm umístěn pacient.
6. Kovové a plastové části myjte ručně s pomocí prostředků určených k mytí plastu. Je nutné se seznámit s návodem k použití daného čistícího prostředku.

Výrobce nenes odpovědnost za škody způsobené špatným čistícím prostředkem.

## Podmínky odpovědnosti za vady

1. Výrobce nese odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců od data prodeje.
2. Všechny výrobní vady objevené během této doby budou opraveny bezplatně.
3. Náklady na přepravu k výrobcí za účelem opravy zjištěných vad hradí prodejce. Zákazník musí dopravit zařízení do místa prodeje. Je nutné zařízení přepravovat a zabalit, aby nedošlo k dalšímu poškození. Jakékoli škody vzniklé nedostatečnou ochranou zařízení při přepravě, nejsou předmětem opravy. Zákazník nemůže požadovat odškodnění, je-li zařízení nesprávně označené nebo nesprávně pojištěné či nepojištěné.
4. Doba odpovědnosti za vady se prodlužuje o dobu pobytu zařízení v opravě.
5. Odpovědnost za vady nepokrývá úkony popsané v tomto návodu k použití, které má uživatel provádět na své vlastní náklady.
6. Zařízení musí být používáno v souladu s tímto návodem k použití. Nerespektování pravidel správného používání či provádění technických změn na zařízení vedou ke ztrátě záruky.
7. Jakékoli poruchy způsobené nesprávným používáním, údržbou či skladováním nejsou předmětem odpovědnosti za vady. Odpovědnost za vady se též nevztahuje na běžné opotřebení či trhliny v čalounění. Takové opravy hradí kupující.
8. Výrobce nenes odpovědnost za opravy provedené v neautorizovaných servisech. Takovéto opravy nebo individuální úpravy zařízení vedou ke ztrátě záruky.
9. Distributor nabízí placený pozáruční servis zařízení.
10. Případy, které zde nejsou uvedeny, se řídí platným občanským zákoníkem.
11. Odpovědnost za vady lze uplatnit u prodejce.

Datum poslední aktualizace: 19.9.2015

Výrobce: UAB Kasko group, A.Vivulskio st.12D, 03221, Vilnius, Lithuania, Tel.: 00 370 5 216 7425, [www.kid-man.com](http://www.kid-man.com)

Výhradní distributor pro ČR: SIV Kladno s.r.o., Vít. Nezvala 750, 27204 Kladno, tel.: 321003002, [www.siv.cz](http://www.siv.cz)