

Typy modelů

Mobilní výškově nastavitelné klozetové křeslo z pochromované oceli, se sklopnými a odnímatelnými područkami, odnímatelnou zadní stranou, 4 kolečky 5" s brzdou, plastovým klozetovým sedátkem se čtvercovou mísou, čalouněným sedákem a zádovou opěrkou a integrovanou tlačnou rukojetí.

84520	Šířka sedadla 510 mm
84522	Šířka sedadla 560 mm

Používání



Upozornění

Tyto výrobky by se měly vždy používat pod dohledem.



Před každým použitím se ujistěte, že jsou čtyři všechny čtyři kolečka pevně zajištěna.

Brzdy / Kolečka

Řada pochromovaných mobilních klozetových křesel Homecraft 845 Deluxe je vybavena 4 plně brzděnými kolečky. Každé kolečko lze zabrzdit zatlačením páčky na kolečku. Tím se zabrání otáčení nebo přetočení koleček. Pokud chcete kolečka uvolnit, zatáhněte páčku nahoru.



Upozornění

Při usedání nebo zvedání se ze židle byste měli vždy zabrzdit kolečky směrem dopředu (obr. 1). I při zabrzdnění může křeslo stále klouzat po hladké podlaze nebo pokud se uživatel nakloní dopředu. Při zvedání nebo usedání do křesla je důležitý dohled druhé osoby. 1)



Odstranění mísy

Klozetová mísa se odstraní vysunutím ze zadní části sedadla.



Područky

Modely 845 mají dvě područky, které se zasouvají do držáků na bocích křesla. Područky můžete odstranit stisknutím páčky směrem k područce, zvednutím přední strany područky a poté uvolněním područky vzadu stisknutím pružinového tlačítka. Při zpětné montáži područek se ujistěte, že je pružinové tlačítko na svém místě. Chcete-li područky pouze sklopit, zatlačte páčku směrem k područce, zvedněte područku a poté spusťte dolů na jednu stranu, dokud se neopře o podpěrnou tyč.



Upozornění

- Před použitím se ujistěte, že jsou područky pevně zasunuty do držáků.
- Nepokoušejte se křeslo zvedat za područky.



Opěrky nohou



Řada mobilních klozetových křesel 845 je standardně vybavena hákem na opěrku nohou (845SA006). Pro nastavení výšky opěrek nohou uvolněte šestihřanný šroub

na spodní straně trubky, dokud se opěrka nohou může plynule pohybovat, sklouzněte dolů do požadované výšky a utáhněte šestihřanný šroub, dokud nebude opěrka nohou pevná. Pro lepší přístup můžete stupátka opěrek nohou svisle vyklopit nahoru.



Zádovou opěrku upevníte tak, že zasunete opěradlo do rámu a dotáhnete šroub s ručním knoflíkem, přičemž hlava šroubu je zapuštěna do šestihřanného tvaru na


Montáž odnímatelné zádové opěrky

vnitřní straně trubky a ruční knoflík a podložka jsou namontovány na vnější straně.

Toaletní mísa & držák mísy (volitelné příslušenství)

Všechna klozetová křesla mohou být vybavena držákem na mísu (část číslo ACC/2).

Chcete-li připevnit držák na mísu, posuňte jej na běžce pod sedadlem (SA154) a zadní příčník zavěste na plastovou svorku na zadní straně sedáku klozetového křesla. Stojan bude držet mísu (číslo části 640) a mísu na jedno použití.

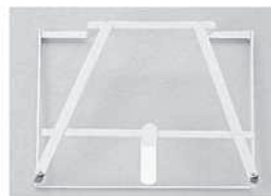

SA154 sestava sedáku č. 640 postelová mísa

ACC/2 držák na mísu

Nastavení výšky

Pro nastavení výšky odlehčete kolečka a poté stiskněte dvě tlačítka, která blokují teleskopické nohy. Lehce otočte nohu a poté ji stáhněte na novou délku. Obě tlačítka by měla zcela vyskočit, aby se noha zajistila. Ujistěte se, že jsou všechny čtyři nohy nastaveny na stejnou výšku

Údržba

- Pochromované klozetové křeslo Homecraft 845 Deluxe je navrženo tak, aby vyžadovalo minimální údržbu a aby bylo možné snadno, modulárně vyměnit jednotlivé díly a zajistit tak jeho dlouhou životnost. Je vyrobeno z chromované oceli.
- Při čištění je otřete měkkým hadříkem. Používejte neutrální univerzální čisticí prostředky a teplou vodu.
- Nepoužívejte drsné abrazivní přípravky.
- Je-li zapotřebí provést dezinfekci, proveďte čištění, jak ho popisujeme výše, a následně křeslo otřete roztokem chlórového dezinfekčního prostředku, opláchněte a osušte. Nečistěte způsobem, který vyžaduje ponoření křesla do vody.
- Před použitím každý den zkontrolujte účinnost brzd a bezpečné připevnění koleček k nohám. Zkontrolujte, zda je křeslo stabilní, tedy zda se všechny čtyři kolečka dotýkají podlahy a žádná z nohou není ohnutá. Zkontrolujte, zda jsou područky klozetového křesla správně umístěny.
- Křeslo je navrženo tak, aby byla možná snadná výměna poškozených nebo rozbitých částí. Pokud dojde k poškození jakýchkoli částí, kontaktujte dodavatele křesla nebo přímo společnost Performance Health a vyžádejte si náhradní díly a pokyny k montáži.

Informace o záruce

Na mobilní klozetová křesla Homecraft 845 Deluxe poskytujeme záruku po dobu jednoho roku od data nákupu na vady zpracování nebo materiálu. Pokud zjistíte závadu, obraťte se prosím na svého dodavatele / prodejce.

Záruka se nevztahuje na následné náklady vzniklé v důsledku řešení reklamace, především ne na náklady na přepravu a cestovné, ušlý zisk a další výdaje.

Výrobce nepřijímá odpovědnost za případné škody ani poranění způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením výše uvedených pokynů.

Náhradní díly	
Čtvercová mísa	PL512
Modrý čalouněný sedák	20" (84520SA003), 22" (84522SA003)
Modrá čalouněná opěrka zad	20" (84520SA004), 22" (84522SA004)
Brzděná kolečka	845SA005
Pružinová tlačítka pro nastavení výšky.	SA001
Područky se dodávají s příslušenstvím pro uchycení	845SA008 (R) nebo 845SA009 (L)
Pouze modrá područka	845PU001

Návod k použití je k dispozici i ve verzi s velkými znaky. Pokud tuto verzi požadujete, obraťte se prosím na zákaznické středisko Performance Health, kde vám zajistí výtisk. Tento návod prosím uschovejte pro budoucí použití.

Vyrobeno pro

Performance Health International Ltd.
Nunn Brook Road, Huthwaite, Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire, NG17 2HU, UK.

UK:

Tel: 03448 730 035
Fax: 03448 730 100
www.performancehealth.co.uk

Mezinárodní:

Tel: +44 1623 448 706
Fax: +44 1623 448 784

Performance Health Supply, Inc.

28100 Torch Parkway Suite 700,
Warrenville, IL 60555-3938, USA.
Tel: 1-800-323-5547
Telefax: 1-800-547-4333

Performance Health Australia

Unit 3, 3 Basalt Road, Pemulwuy
NSW, Australia 2145. Tel: 1300 473 422
Fax: 1300 766 473

Performance Health France

Zone Industrielle de Montjoly, 11 Avenue de l'Industrie - CS 40712 08013 Charleville-Mezieres Cedex, France. Tel: 03 24 52 61 15
Fax: 03 24 52 90 34



**PERFORMANCE
HEALTH**