


## Série ergonomických zvýšených toaletních sedátek

Odkaz	Popis
9.7207	Rehotec zvýšené toaletní sedátko 7cm
9.7207C	Rehotec zvýšené toaletní sedátko 7cm s poklopem
9.7210	Rehotec zvýšené toaletní sedátko 10cm
9.7210C	Rehotec zvýšené toaletní sedátko 10cm s poklopem
9.7213	Rehotec zvýšené toaletní sedátko 13cm
9.7213C	Rehotec zvýšené toaletní sedátko 13cm s poklopem
9.7215	Rehotec zvýšené toaletní sedátko 15cm
9.7215C	Rehotec zvýšené toaletní sedátko 15cm s poklopem

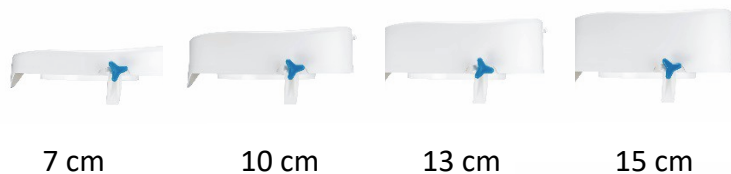

7 cm

10 cm

13 cm

15 cm

### Výhody:

- Pohodlná a ergonomická:
  - obecný 3 ° sklon sedátka odpovídá přirozené poloze pánve,
  - oblý horní profil odpovídá anatomickému tvaru,
  - velká dosedací plocha vepředu i vzadu díky zvláštnímu profilu,
  - ergonomická kolečka pro snadnější manipulaci
- Denní použití:
  - Velké výřezy vepředu i vzadu pro snadnější otírání
  - Otevření poklopu bez nutnosti dotknout se sedátka
  - Možnost sedět na sedátku se sklopeným poklopem
- Hygienický design produktu:
  - bez vnější drsnosti,
  - snadné čištění:
  - dovnitř neproniknou kapaliny.




### Nastavení:

- Stačí nainstalovat zvýšené toaletní sedátko na toaletu (nasadíte přední část sedátka na přední část toalety) a dotáhnout kolíky pomocí 2 koleček. Ergonomická a pevná kolečka umožňují maximální dotažení. Protiskluzová úprava snižuje riziko sklouznutí.

### Jak připevnit poklop:

- Poklop lze jednoduše připevnit a odstranit nacvaknutím na sedátko v poloze dnem vzhůru.
- Ve sklopené nebo svislé poloze je sedátko opatřeno bezpečnostním systémem, který zajistí, aby zůstal poklop na místě.

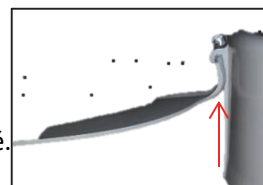

### Popis:

- Rozměry: 43 x 44,5 cm
- Maximální hmotnost při použití: 180 kg

### Složení:

- polypropylen

### Čištění:

- Mýdlová vodě a všechny běžné čisticí prostředky
- strojové mytí a mytí v autoklávu možné
- Neponořujte, nevracejte při mytí

### Opatření pro použití:


- Na zvýšené toaletní sedátko nestoupejte.
- Před použitím zkontrolujte, zda jsou kolečka správně utažena.
- Nepoužívejte v případě, že je zvýšené toaletní sedátko poškozeno nebo pokud jste na něm našli vady.
- Udržujte mimo dosah dětí.
- PharmaOuest Industries nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím zvýšeného toaletního sedátka.

### Balení:

- Individuální box o velikosti 43 x 44,5 x 19,5cm

Odkaz	Výška (cm)	Čistá hmotnost (kg)	Celková hmotnost (kg)
9.7207	7	0,9	1,3
9.7207C	7,5	1,2	1,6
9.7210	10	1	1,4
9.7210C	10,5	1,35	1,75
9.7213	13	1,15	1,55
9.7213C	13,5	1,5	1,9
9.7215	15	1,3	1,7
9.7215C	15,5	1,6	2

**ROZMĚRY V CM**

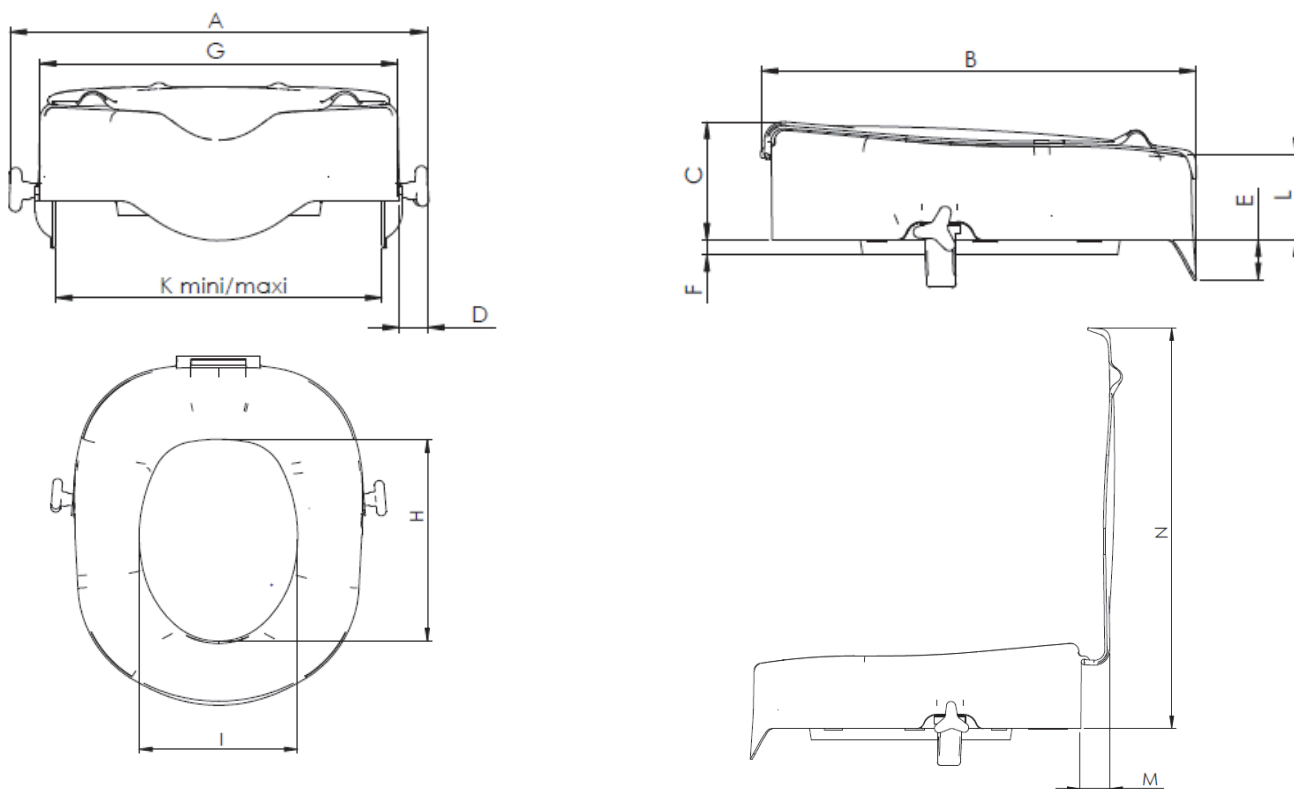

	9.7207	9.7207C	9.7210	9.7210C	9.7213	9.7213C	9.7215	9.7215C
A	43	43	43	43	43	43	43	43
B	44	44	44	44	44	44	44	44
C	7	7,5	10	10,5	13	13,5	15	15,5
D	3	3	3	3	3	3	3	3
E	4	4	4	4	4	4	4	4
F	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
G	35	35	35	35	35	35	35	35
H	26	26	26	26	26	26	26	26
I	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
K mini/maxi	32/42	32/42	32/42	32/42	32/42	32/42	32/42	32/42
L	6	6,5	9	9,5	11	11,5	13	13,5
M	-	4	-	4	-	4	-	4
N	-	48	-	52	-	54	-	56

Výrobce: PHARMAOUEST INDUSTRIES - Actipole 35 - BP 12 - 2, Rue de Saint-Coulban 35540 MINIAC MORVAN

Tél. +33 (0)2 99 82 21 21 - Fax +33 (0)2 99 82 15 45 - Fax Vert 0800 87 70 45

[www.pharmaouest.com](http://www.pharmaouest.com) – [service.qualite@pharmaouest.fr](mailto:service.qualite@pharmaouest.fr)

Aktualizace: červen 2019

